

Medizinprodukte semikritisch A (maschinelle Verfahren)

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen</p> <p style="color: green; font-weight: bold; margin-top: 10px;">Verwendete Verfahren vollständig ausfüllen !</p> <p style="color: red; font-weight: bold; margin-top: 10px;">Nicht verwendete Verfahren streichen !</p>	<p>Verfahren 1.1: Validiertes Verfahren im RDG</p> <hr/> <p>oder</p> <p>Verfahren 1.2: Verfahren im RDG bei dem nur die Reinigung validiert wurde</p> <hr/> <p>anschließend</p> <p>Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator *</p> <hr/> <p>oder</p> <p>Verfahren 3: maschinelle Reinigung ohne Desinfektionsstufe</p> <hr/> <p>anschließend</p> <p>Verfahren 3: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator *</p>	<p>Gerät / Programm: RDG Firma XYZ Universalprogramm]</p> <hr/> <p>Gerät / Programm:</p> <hr/> <p>Gerät / Programm:</p> <hr/> <p>Gerät / Programm:</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zellstofftupfer entfernen) ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen) 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>

Medizinprodukte semikritisch A (manuelle Verfahren)

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen</p> <p style="color: green; font-weight: bold; margin-top: 10px;">Alle Felder vollständig ausfüllen !</p>	<p>Verfahren 2.1: Eintauchverfahren (bei Bedarf in Kombination mit Ultraschall)</p> <hr/> <p>anschließend</p> <p>Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator *</p>	<p>Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion (2):</p> <p style="background-color: #e6f2ff; padding: 2px;">InstruDesinf Firma ABC</p> <p style="background-color: #e6f2ff; padding: 2px;">Dosierung / Einwirkzeit: 3% - 1 Std.</p> <p style="background-color: #e6f2ff; padding: 2px;">maximale Standzeit der Lösung: 1 Tag</p> <p>Gerät / Programm: B-Autoklav Firma XYZ</p> <p style="background-color: #e6f2ff; padding: 2px;">Universalprogramm unverpackt</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen) unmittelbar nach der Behandlung vollständig und blasenfrei einlegen Einwirkzeit beginnt nach Einlegen des letzten Medizinproduktes nach Ende der Einwirkzeit unter fließendem Wasser abspülen (Siebeinsatz) Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung Trocknung und Pflege 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>
	Freigabe zur erneuten Anwendung	Dokumentation	• wurden bei der Aufbereitung	alle Beschäftigten mit